



型號
SC4888

淋浴椅 安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

產品說明

此款為鋁合金淋浴椅，坐板和靠背採用環保PE材料，鋁合金主架輕便、耐用、不易生鏽，腳管可調整高度，腳墊有防滑效果。坐板下的轉盤結構，可以360度旋轉。腳管、靠背和扶手無需工具就可以快速方便拆裝。本產品耐荷重：120KG以下。

組裝注意事項

- ① 請注意周圍環境，組裝時請勿傷到其他家具。
- ② 為了安全，請務必在空曠的場所，且2人以上組裝。
- ③ 組裝時，請注意手指不要被夾到。

日常清潔與保養

- ① 使用前請檢查洗澡椅是否有損壞或變形，定期檢查螺絲是否鬆動。
- ② 清潔保養時，請勿使用具有腐蝕性之清潔產品，避免以菜瓜布或去汙粉刷洗，以免破壞產品表面，使用後，即時用乾布將水漬擦乾，放置於乾燥通風環境中。

產品零件圖



產品組裝步驟順序圖

步驟 (1)



1. 打開箱子，取出所有配件。

步驟 (2)



2. 安裝腳管，取腳管，按下彈珠，並插入到主架管內，彈珠要彈出主架管孔外，將4根腳管都安裝好

步驟 (3)



3. 安裝扶手，取扶手，按下兩邊的彈珠，並插入到主架管內，彈珠要彈出主架管孔外。

步驟 (4)



4. 安裝靠背，取靠背，按下兩邊管上的彈珠，並插入到主架管內，彈珠要彈出主架管孔外。

步驟 (5)



需要旋轉時，先將此拉鎖手柄往外拉才可以旋轉

5. 調節腳管高度到合適身高位置，讓彈珠從對應孔彈出，並能聽到“咔嚓”聲，四根腳管的孔位要調到同一對應位置，

步驟 (6)



6. 將小蓮蓬頭插座裝入扶手前方管上，插座可插入小蓮蓬頭使用，安裝完成。

服務中心地址及電話

服務中心	服務地區	地 址	電 話
大台北維修中心	基隆 台北 新北	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心		台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹 苗栗	新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰投維修中心	彰化 南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林 嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄 屏東	高雄市新興區中正路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭 花蓮	花蓮縣花蓮市國聯四路80號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			